

**ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE**

MMN, a.s., nemocnice Jilemnice
Metyšova 465
Jilemnice 514 01

Platné od: 7. 12. 2020

Strana: 1 z 1

Stability vybraných analytů v séru/plazmě

Analyt	Materiál	Stabilita při teplotě		
		+15 až +25°C	+2 až +8°C	-20°C
ABR	plná krev	15 minut	2 hodiny	x
Albumin	sérum/plazma	1 týden	30 dnů	10 let
ALT	sérum/plazma	2 dny	5 dnů	x
AST	sérum/plazma	3 dny	1 týden	4 týdny
Bilirubin	sérum/plazma	1 den	3 dny	12 týdnů
vzorky chránit před světlem				
Ca	sérum/plazma	2 dny	3 týdny	8 měsíců
Celková bílkovina	sérum/plazma	1 týden	4 týdny	12 měsíců
CK	sérum/plazma	2 dny	1 týden	4 týdny
Cl	sérum/plazma	8 hodin	2 týdny	1 rok
CRP	sérum/plazma	1 den	1 týden	12 týdnů
Fe	sérum/plazma	1 týden	3 týdny	1 rok
GGT	sérum/plazma	3 dny	1 týden	8 týdnů
Glukóza	sérum/plazma s NaF	24 hodin	1 týden	1 rok
HbA1c	plná krev	2 dny	5 dní	x
Cholesterol	sérum/plazma	1 den	1 týden	12 týdnů
K	sérum/plazma	8 hodin	2 týdny	1 rok
Kreatinin	sérum/plazma	3 dny	1 týden	1 rok
Kyselina močová	sérum/plazma	3 dny	1 týden	1 rok
Mg	sérum/plazma	1 týden	1 týden	1 rok
Na	sérum/plazma	8 hodin	2 týdny	1 rok
P	sérum/plazma	4 dny	1 týden	1 rok
Transferin	sérum/plazma	1 den	1 týden	12 týdnů
Triacylglyceroly	sérum/plazma	3 dny	10 dnů	2 roky
Troponin I	plazma	8 hodin	2 dny	6 měsíců
TSH	sérum/plazma	2 dny	1 týden	1 rok
Urea	sérum/plazma	1 týden	2 týdny	2 roky

Zdroje stability:

Národní číselník laboratorních položek, <https://dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBFV.htm>Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy, [Klin. Biochem. Metab., 19 \(40\), 2010, No. 1, p. 48- 61](#)

Návody k použití reagentie, Beckman Coulter

Vypracovala: Ing. Barbora Gottwaldová

7. 12. 2020